

# 사용 설명서

## 소파전용 안전손잡이 MCG-300



※ 본 제품을 사용하기 전에 이 설명서를 반드시 읽어보신 후, 사용하시고 이후에도 설명서를 잘 보관해 두시기 바랍니다.

**MCTec**

제품문의 : (주)엠씨텍 1577-5195  
경남 김해시 주촌면 골든루트로66번길 48-1  
[www.mctec.co.kr](http://www.mctec.co.kr)

## 제품의 사양

- ◇ 제품명 : 소파전용 안전손잡이 MCG-300
- ◇ 규 격 : 615(L)mm x 575(W)mm x 620(H)mm
- ◇ 무 게 : 4kg
- ◇ 안전동작하중 : 80kg
- ◇ 재 질 : 스테인리스스틸(SUS), 고무, 플라스틱




## 제품의 특징


- ◇ 소파전용 안전손잡이는 누구나 간편하게 조립할 수 있도록 제작되었습니다.
- ◇ 소파하부에 일정한 공간만 있으면 사용이 가능하고, 제품이 소파에 밀착되도록 하부지지대를 소파 밑으로 밀어 넣으면 설치가 끝납니다.
- ◇ 본 제품은 거치식이므로 밀거나 당기지 않고 소파에 착석하거나 기립할 때 짚고 지지하는 용도로만 사용하는 제품입니다.
- ◇ 필요에 따라 분해를 할 때는 동봉한 공구를 사용하여 양쪽의 볼트를 풀면 간단하게 분해가 됩니다.

## 사용상 주의사항

- 소파전용 안전손잡이로 반드시 설명서를 잘 읽고 용도에 맞게 사용하여 주십시오.
- 설치 전 연결부분이 견고하게 조립되었는지 확인 후 설치하십시오.
- 소파와 바닥과의 공간이 4cm이상 필요하며, 제품의 하부지지대가 들어갈 공간이 충분치 않으면 사용할 수 없습니다.
- 사용 시 바닥의 지지대에 부딪히지 않도록 주의합니다.
- 본 제품은 소파전용 단순거치식 안전손잡이로 짚고 기립·착석하는 용도 이외에 밀거나 당기는 등의 행위를 금합니다.

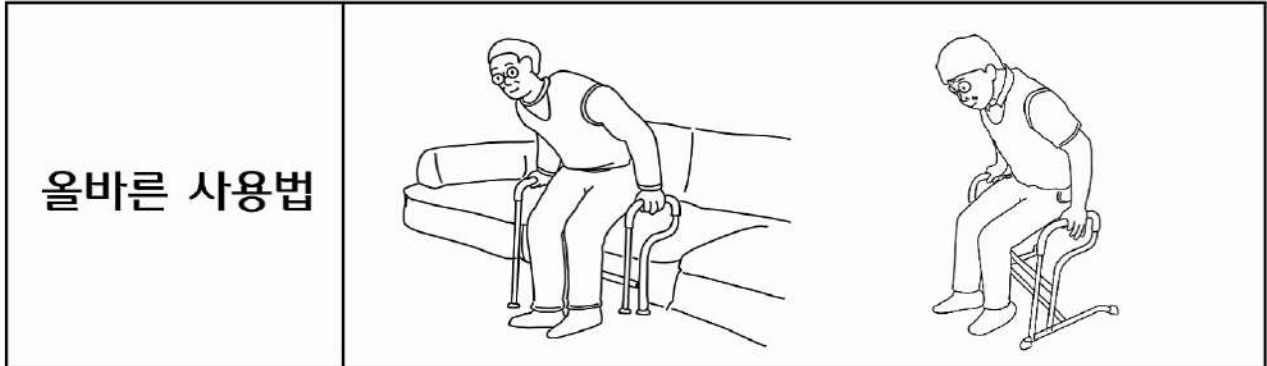


★ 사용중 이동을 용이하게 하기위한 경량화 제품으로 짚고 기립·착석하는 용도로만 사용바랍니다.

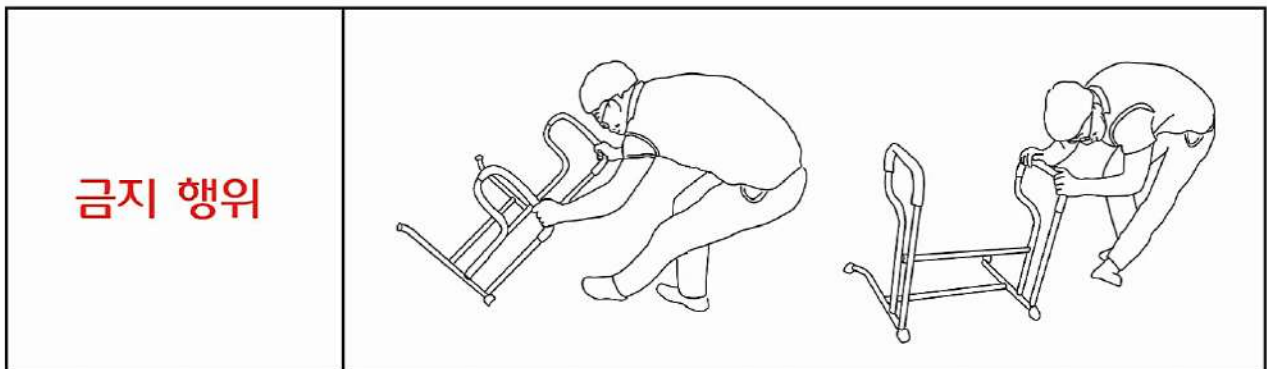

★ 전후좌우 무리한 하중을 가하면 넘어질 수 있으니 절대 금합니다.

## 제품 설치방법

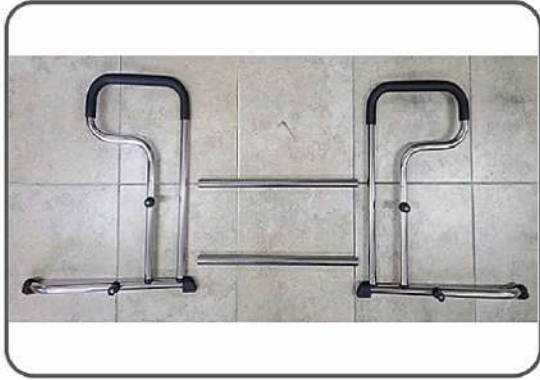

① 구성품을 확인합니다.  
(좌,우측프레임, 가로대2, 렌치1)



② 가로대 파이프 양끝으로  
브라켓을 집어넣고 조립합니다.



③ 프레임을 세우고 먼저 하부  
브라켓에 가로대를 조립합니다.



④ 동봉한 렌치로 이용하여 볼트를  
잠그면서 결합시킵니다.



⑤ 견고한 결합을 위해 제품을  
눌러 조립하면 보다 편리합니다.




⑥ 조립이 완성되면 좌우로  
조정하며 균형을 확인합니다.

# 단체표준인증 및 시험성적서

## 시험성적서


### 단체표준제품인증서

**인증번호 :** 제869호(20220310-3)  
**업체명 :** (주)엠씨텍  
**대표자 :** 이상용  
**공장소재지 :** 경상남도 김해시 주촌면 골든루트로66번길 48-1  
**공장사업자등록번호 :** 615-81-71247  
**인증계약유효기간 :** 2023.04.21  
**단체표준명 :** 안전손잡이  
**단체표준번호 :** SPS-KSPA 5001-1894  
**종류·등급·호칭 모델 :** 거치형 안전손잡이 Products  
 (모델명 : MCG-300)




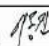
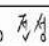
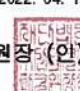
「단체표준인증무규정」 제20조의 규정에 의한 인증심사를 실시한 결과 한국고령친화용품산업협회 단체표준 및 인증심사기준에 적합하므로 「단체표준인증무규정」 제27조8항의 규정에 의하여 위와 같이 한국고령친화용품산업협회 단체표준표시를 인증합니다.

2022년 04월 22일





### 한국고령친화용품산업협회장

\* 최초인증일 : 2022.04.23      \* 최종발령일 :  
 \* 변경/재발부사용 :

 <b>재단법인 부산테크노파크</b> 부산광역시 경서구 과학산단1로 80번길 31 Tel : 051-020-3573 Fax : 051-020-3559	성적서번호 : BTP-2022-0316 페이지( 1 ) / 총( 5 )
<b>1. 의뢰자</b> ○ 기관명 : 엠씨텍(사단법인 한국고령친화용품산업협회) ○ 주소 : 서울특별시 동작구 상도로 15길 B5 서진빌딩 3층 ○ 의뢰일자 : 2022. 04. 05.	
<b>2. 시험성적서의 용도 :</b> 단체표준인증 신규	
<b>3. 시료 설명 :</b> 안전손잡이 / 거치형 안전손잡이 / MCG-300	
<b>4. 시험기간 :</b> 2022. 04. 04. ~ 2022. 04. 15.	
<b>5. 시험장소 :</b> <input checked="" type="checkbox"/> 고정시험실 <input type="checkbox"/> 현장시험 (주소 : 부산시 사상구 영공로 70-16 (재)부산테크노파크 B101호)	
<b>6. 시험방법 :</b> SPS-KSPA 5001 : 2017 안전손잡이	
<b>7. 시험환경 :</b> 온도 : ( 23 ± 2 ) °C , 습도 : ( 50 ± 5 ) % R.H.	
<b>8. 시험결과 :</b> 적합	
* 이 성적서는 의뢰자가 제공한 시료로 시험한 결과로서 전자 차폐에 대한 품질을 보증하지는 않습니다. * 본 성적서는 시험성적서의 용도 이외의 사용은 금합니다. (성적서 권위확인 문의전화 : 051-020-3573)	
<b>확인</b> 작성자 : 이 동 진 (서명)  성명 : 이 동 진 (서명)	기술책임자 : 권 성 철 (서명)  성명 : 권 성 철 (서명)
2022. 04. 15.	
재단법인 부산테크노파크 원장 (인) 	

BTP-02-22-02-1/2 (5)      제정일자(2010.12.01) / 개정일자(2020.03.01)

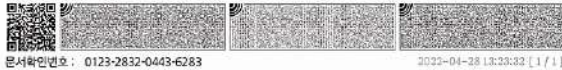

	단체표준명(품명) : 소파안전손잡이 단체표준번호 : KSPA 5001 인증번호 : 제869호(20220310-3) 모델명 및 모델 고유번호 : MCG-300 제조년월 : 제조자명 : (주)엠씨텍 A/S 전화번호 : 1577-5195 제조국명 : 대한민국
<b>품질보증</b> 본 제품은 단체표준인증단체인 당 협회에서 단체표준제품임을 보증함 한국고령친화용품산업협회	

※ 본 제품을 사용하시기 전에 이 설명서를 반드시 읽어보신 후, 사용하시고  
 이후에도 설명서를 잘 보관해 두시기 바랍니다.

# 품 질 보 증 서

품 목 명	소파전용 안전손잡이	보증기간
제 품 명	MCG-300	구입일로부터 1년
구 입 일	년 월 일	

고 객	주소	성 명	
		연락처	
판매점	주소(상호)	담당자	
		연락처	

1. 제품 구입시 공란의 내용을 필히 기입하여 주십시오.
2. 본 제품은 출고시 엄밀한 품질관리를 거쳐 생산된 제품입니다.
3. 운송 도중 발생한 파손이나 도금형태가 변질되어 사용불능일 경우, 보증서에 기재된 내용에 따라 보증하여 드립니다.
4. 본 보증서는 재발행되지 않으며, 국내에서만 유효합니다.
5. A/S 및 문의처 : 1577-5195 / 055-323-5195

## 보 증 규 정

고객께서 구입하신 본 제품에 대하여 아래와 같은 조건으로 보증하여 드립니다.

1. 보증기간  
제품의 정상적인 상태에서 발생한 고장에 대하여 1년간 보증하여 드립니다.
2. 보증수리 제외사항
  - 1) 사용자의 취급부주의 및 조작의 잘못으로 인한 고장이나 파손
  - 2) 당사 지정 수리요원 외 제3자가 수리하였거나 부당한 수리 개조에 의한 고장이나 파손
  - 3) 보증서를 분실 또는 수탁 판매점의 직인이 없을 때
  - 4) 천재지변에 의한 고장 및 파손
3. 보증기간 외의 수리  
보증기간 경과 후의 수리 요청 시에는 소정의 기술료를 징수합니다.
4. 기타  
본 보증규정 이외의 사항에 대하여는 "소비자 기본법"에 의거한 "소비자 분쟁해결기준"에 의해 처리됩니다.