

# 안전손잡이

## (Safety Handle 벽부착형)

MHW-40



MHW-80



MHW-120



설치 가능장소 / 침실, 화장실, 이동통로, 출입문 주변

- ※ 본 제품을 사용하기 전에 이 설명서를 반드시 읽어 보신 후  
사용하시고 이후 에도 설명서를 잘 보관해 두시기 바랍니다.
- ※ 본 제품은 환자나 고령자의 편의를 위하여 사용하는 안전손잡이입니다.

## 1. 제품사양

- 제품명 : 안전손잡이
- 재 질 : 비치목, 아연다이캐스팅

모 델 명	규 격(mm)	무 게	안전동작하중
MHW-40	470 x 80 x $\phi$ 35	0.7kg	80kg
MHW-80	870 x 80 x $\phi$ 35	1.0kg	80kg
MHW-120	1,270 x 80 x $\phi$ 35	1.4kg	80kg

## 2. 제품구성

부 품	수 량		
	MHW-40	MHW-80	MHW-120
안 전 손 잡 이	1	1	2
나일론앵커 $\phi$ 6	6	6	8
SUS스크류(4X50)	6	6	8
SUS스크류(3X16)	2	2	4
축광스티커( $\phi$ 15)	2	2	3
아연다이캐스팅	2	2	3

### 3. 제품소개

- 1) 거동이 불편한 노인, 장애인, 환자분들이 실내에서 스스로 이동을 할 때 또는 착석 및 기립을 할 때 보조해 주는 벽부착형 안전손잡이입니다.
- 2) 본 제품은 다양한 길이로 실내 구조와 사용자에 편의에 맞게 설치할 수 있도록 제작되었습니다.

### 4. 제품의 특징

- 1) 천연원목을 사용하여 친환경적인 디자인을 연출하게 됩니다.
- 2) 손잡이는 어느 위치에서 잡더라도 편안하고 안정감 있는 원형으로 제작되었습니다.
- 3) 안전을 최우선으로 설계하여 부착력이 강한 구조의 브라켓을 개발했습니다.
- 4) 녹 발생이 없는 아연다이캐스팅에 크롬도금으로 가공하여 외관이 고급스럽습니다.
- 5) 야광 식별장치가 있어 어두울 때도 손잡이 사용이 편리합니다.
- 6) 간편하게 시공할 수 있도록 제작되었습니다.

## 5. 제품사용 전 주의사항

- 1) 제품 설치할 때 설명서를 잘 읽고 설치하여 주십시오.
- 2) 설치 전 볼트 및 연결부분이 단단히 조립되어 있는지 확인 후 설치하십시오.
- 3) 합판, 석고보드, 조립식 판넬 등 부착하기에 적합하지 않은 곳에는 설치하지 마십시오.
- 4) 실내 구조와 사용자에게 편의에 맞게 적합한 위치를 결정하여 설치하십시오.
- 5) 사용하기 전에 견고하게 설치되었는지 확인하고 사용하십시오.
- 6) 제품의 안전동작 하중은 80kg이며 이를 초과하는 사람은 사용에 주의 하십시오.
- 7) 사용을 할 때도 수시로 손잡이의 청결을 유지하시고, 주 1회 정도 나사의 체결상태를 점검하며 안전을 확인해 주십시오.
- 8) 본 제품을 임의로 분해를 한다거나, 무리한 하중이나 강한 충격을 주지 마십시오.
- 9) 욕실에 설치된 경우, 물기나 세제가 묻은 손으로 잡을 때 미끄러울 수 있으니 주의 하십시오.
- 10) 제품에 이상이 있을 경우 제조사에 문의하십시오.


(Tel. 1577-5195)

- \* 소비자의 안전을 위해서 반드시 준수하십시오. 안전수칙을 무시한 사고에 대하여 당사에서는 법적 책임을 지지 않습니다.

## 6. 제품의 설치방법

- \* 제품개봉 후 동봉된 품목목록을 확인하신 후 조립순서에 따라 설치하여 주십시오.
- \* 설치할 때 필요한 공구는 다음과 같습니다.  
전동 해머드릴, 콘크리트 드릴비트 (Φ6), 드라이버, 수평계, 줄자, 마킹펜
- \* 설치시 주의사항  
벽면 내에 전선, 배관 등에 주의하여 설치합니다.  
전문가가 설치하는 것을 권장합니다.

### 1) MHW-40, MHW-80

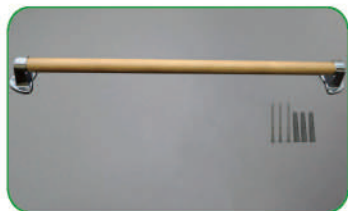

- 1 부품을 확인 합니다.  
1. 안전손잡이-1EA  
2. SUS스크류(4mmX50mm)-6EA  
3. 나일론 앵커Φ6-6EA



- 2 설치할 곳에 안전손잡이를 갖다 대고 브라켓의 구멍을 통해 벽에 표시를 합니다.  
\* 수평이 되도록 주의 합니다.



- 3 전동 해머드릴로 벽에 드릴링 합니다.(Φ6)



- 4 구멍에 나일론 앵커를 삽입합니다.




- 5 SUS스크류(4mmX50mm)로 안전손잡이를 벽에 견고하게 고정시킵니다.  
이때 무리하지 않도록 주의하십시오.

\* 설치 후 부착이 잘 되었는지 필히 확인해 주십시오.



## 2) MHW-120

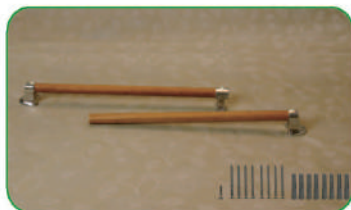

- 1 부품을 확인 합니다.

1. 안전손잡이-2EA
2. SUS스크류(4mmX50mm)-8EA
3. 나일론 앵커Φ6-8EA
4. SUS스크류(3mmX16mm)-1EA



- 2 600mm 안전손잡이를 SUS스크류(3mmX16mm)로 아연다이캐스팅에 고정을 합니다.



- 3 설치할 곳에 안전손잡이를 갖다 대고 브라켓의 구멍을 통해 벽에 표시를 합니다.

\* 수평이 되도록 주의 합니다.



- 4 전동 해머드릴로 벽에 드릴링합니다.  
(Φ6)



- 5 구멍에 나일론 앵커를 삽입 합니다.



- 6 SUS스크류(4mmX50mm)로 안전손잡이를 벽에 견고하게 고정시킵니다.  
이때 무리하지않도록 주의하십시오.

\* 설치 후 부착이 잘 되었는지 필히 확인해 주십시오.

## 보증규정

고객께서 구입하신 본 제품에 대하여 아래와 같은 조건으로 보증하여 드립니다.

1. 보증기간  
제품의 정상적인 상태에서 발생한 고장에 대하여 1년간 보증하여 드립니다.
2. 보증수리 제외사항
  - 1) 사용자의 취급부주의 및 조작의 잘못으로 인한 고장이나 파손
  - 2) 당사 지정 수리요원 외 제3자가 수리하였거나 부당한 수리개조에 의한 고장이나 파손
  - 3) 보증서를 분실 또는 수탁 판매점의 직인이 없을때
  - 4) 천재지변에 의한 고장 및 파손
3. 보증기간 외의 수시  
보증기간 경과 후의 수리 요청 시에는 소정의 기술료를 징수합니다.
4. 기 타  
본 보증규정 이외의 사항에 대하여는 "소비자 기본법"에 의거한 "소비자분쟁해결기준"에 의해 처리됩니다.

# 품 질 보 증 서

품 목 명	안전손잡이	보증기간
제 품 명		구입일로부터 1년
구 입 일	년 월 일	

고 객	주소	성 명	
		연락처	
판매점	주소(상호)	담당자	
		연락처	

1. 제품 구입시 공란의 내용을 필히 기입하여 주십시오.
2. 본 제품은 출고시 엄밀한 품질관리를 거쳐 생산된 제품입니다.
3. 운송도중 발생한 파손이나 도금형태가 변질되어 사용불능일 경우, 보증서에 기재된 내용에 따라 보증하여 드립니다.
4. 본 보증서는 재발행되지 않으며, 국내 에서만 유효합니다.
5. A/S 및 문의처 : 1577-5195 / 055-323-5195

- 상 호 : (주)엠씨텍
- 주 소 : 경남 김해시 주촌면 골든루트로66번길 48-1
- 전 화 : 1577-5195
- 팩 스 : 055-323-5171
- 홈페이지 : www.mctec.co.kr

**MC Tec** (주)엠씨텍