

품질보증서

품 목 명	일반침대용 사이드레일	보증기간
제 품 명	MBS-100	구입일로부터 1년
구 입 일	년 월 일	

고 객	주소	성 명	
		연락처	
판매점	주소(상호)	담당자	
		연락처	

1. 제품 구입시 공란의 내용을 필히 기입하여 주십시오.
2. 본 제품은 출고시 엄밀한 품질관리를 거쳐 생산된 제품입니다.
3. 운송 도중 발생한 파손이나 도금형태가 변질되어 사용불능일 경우, 보증서에 기재된 내용에 따라 보증하여 드립니다.
4. 본 보증서는 재발행되지 않으며, 국내에서만 유효합니다.
5. A/S 및 문의처 : 1577-5195 / 055-323-5195

보증규정

고객께서 구입하신 본 제품에 대하여 아래와 같은 조건으로 보증하여 드립니다.

1. 보증기간
제품의 정상적인 상태하에서 발생한 고장에 대하여 1년간 보증하여 드립니다.
2. 보증수리 제외사항
 - 1) 사용자의 취급부주의 및 조작의 잘못으로 인한 고장이나 파손
 - 2) 당사 지정 수리요원 외 제3자가 수리하였거나 부당한 수리 개조에 의한 고장이나 파손
 - 3) 보증서를 분실 또는 수탁 판매점의 직인이 없을 때
 - 4) 천재지변에 의한 고장 및 파손
3. 보증기간 외의 수리
보증기간 경과 후의 수리 요청 시에는 소정의 기술료를 징수합니다.
4. 기타
본 보증규정 이외의 사항에 대하여는 "소비자 기본법"에 의거한 "소비자 분쟁해결기준"에 의해 처리됩니다.

사용설명서

일반침대용 사이드레일
MBS-100



MCTec

제품문의 : (주)엠씨텍 1577-5195
경남 김해시 주촌면 골든루트로66번길 48-1
www.mctec.co.kr

- 본 제품은 거동이 불편한 노인, 장애인, 환자가 낙상을 방지하기 위해 침대에 고정하여 사용하는 사이드레일입니다.
- 본 제품은 침대프레임과 매트리스 사이에 사이드레일의 베이스를 간편하게 거치하고 사용하는 제품입니다.

제품의 사양

- ◇ 제품명 : 일반침대용 사이드레일 MBS-100
- ◇ 규 격 : 790(L)mm x 510(W)mm x 530(H)mm
- ◇ 무 게 : 2.2kg
- ◇ 재 질 : 스테인레스 스틸(SUS), 고무



제품의 사용방법


- ◇ 사용설명서를 보고 구성품을 조립한 다음 견고하게 연결되었는지 확인 후 사용하십시오.
- ◇ 본 제품의 베이스가 수평이 맞는지 확인하고 경우에 따라 조절할 수도 있습니다.
- ◇ 침대의 왼편, 오른편 중에 본 제품을 설치할 곳을 정합니다.
- ◇ 침대프레임위에 본 제품의 수평(베이스)부분을 거치하고 안전벨트를 반대편에 고정시킵니다.
- ◇ 설치된 본 제품위에 매트리스를 올리고 수직(손잡이)부분을 잡고 사용합니다.
- ◇ 수직형태의 손잡이 커버포켓에 간단한 물품을 수납할 수 있습니다.

사용상 주의사항

- ◇ 본 제품을 사용할 때는 설명서를 잘 읽고 용도이외의 사용을 금합니다.
- ◇ 본 제품은 기립 보조제품이므로 이를 밀거나 당긴다던지 하는 무리한 하중을 가하지 않도록 하고 주로 수직으로 짚으며 사용합니다.
- ◇ 본 제품을 안전벨트로 침대 프레임에 견고하게 고정하지 않았으면 사용을 금지합니다. 충분한 고정이 안되면 사용 중 제품이 이탈하여 위험할 수도 있습니다.
- ◇ 안전벨트 연결이 어려운 경우는 A/S센터로 연락바랍니다.(1577-5195)




1. 침대프레임에 설치된 모습

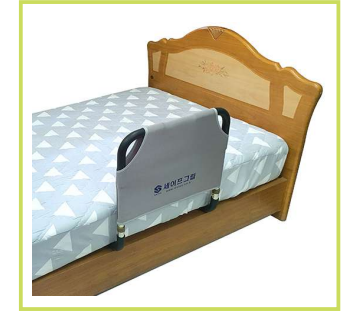

2. 매트리스를 얹은 후 모습

단체표준인증 및 우수제품인증

	단체표준명(품명): 고령자용 침대 사이드레일 단체표준번호: KSPA 1017 인증번호: 제795호(20201221-2) 모델명 및 모델 고유번호: MBS-100 제조년월: 제조자명: A/S 전화번호: 1577-5195 제조국명: 대한민국
	품 질 보 증 본 제품은 단체표준인증단체인 당 협회에서 단체표준제품임을 보증함 한국고령친화용품산업협회

※ 본 제품을 사용하기 전에 이 설명서를 반드시 읽어보신 후, 사용하시고 이후에도 설명서를 잘 보관해 두시기 바랍니다.