
사 용 설 명 서

MSH-103S



※ 본 제품을 사용하기 전에 이 설명서를 반드시 읽어 보신후, 사용하고 이후에도 설명서를 잘 보관해 두시기 바랍니다.

※ 본 제품은 환자나 고령자의 편의를 위하여 사용하는 안전손잡이입니다.

1. 제품 사양

제품명	MSH-103S
규격	520(L) X 610(W) X 665(H) mm
제품무게	8.5kg
최대사용자체중	80kg
재질	스테인레스 스틸(SUS), 플라스틱

2. 제품 구성



명칭	수량
안전손잡이 완제품	1
설명서	1
연장볼트	2
4mm렌치	1
6mm렌치	1
고정형 사출물	2

3. 제품 소개

- 1) 거동이 불편한 노약자가 화장실에서 좌변기를 사용할 때 착석과 기립을 지원해주며 낙상예방에 도움이 되는 안전손잡이로서 사용자가 스스로 안락한 배변활동을 할 수 있도록 도와주는 제품입니다.
- 2) 본 제품은 다양한 형태의 좌변기에 범용적인 장착이 가능하도록 제작되었습니다.

4. 제품의 점검사항 및 주의사항

- 1) 본 제품은 간편한 조작으로 설치가 가능하고, 설치 후 바로 사용이 가능합니다.
- 2) 본 제품은 경사에 따라 받침대 노브로 수평을 조절할 수 있습니다.
- 3) 본 제품은 사용자의 편의에 맞춰 팔걸이를 고정하거나 해제하여 사용 가능합니다.



※ 초기 장착되어 있던 캡너트를 풀어내면 사용이 편리합니다.



※ 사진과 같이 안전핀을 빼내야 팔걸이 각도 조절이 가능합니다.

5. 제품사용 전 주의사항


- 1) 제품 설치 시 설명서를 잘 읽고 설치하여 주십시오.
- 2) 설치 전 볼트 및 연결부분이 단단히 조립되어 있는지 확인 후 사용하십시오.
- 3) 가급적 평평한 바닥부분에 물기를 제거해 주시고 설치하여 주십시오.
- 4) 본 제품을 좌변기에 밀착한 후 양측면의 고정노브를 돌리면 노브의 볼트가 고정바를 밀게 되면서 안전손잡이를 변기에 밀착. 고정시키게 됩니다.
(과도한 고정으로 변기 파손이 되지 않도록 유의합니다.)
- 5) 본 제품이 좌변기에 흔들림 없이 조립되어 있는지 확인 후 사용하십시오. 단단히 조립되지 않은 경우 파손이나 부상이 발생할 수도 있습니다.
- 6) 과도한 하중이나 충격은 파손의 원인이 되니 주의하십시오.
- 7) 제품에 이상이 있을 경우 제조사에 문의주시기 바랍니다.
(Tel. 1577-5195)

6. 제품의 설치 방법




- ① 제품 상태를 점검하여, 정상작동 유무를 확인합니다.

- ② 앞쪽의 범퍼노브가 변기에 닿을 때까지 밀어줍니다. 범퍼노브가 밀착되고 양쪽에 공간이 균등한지 확인합니다.

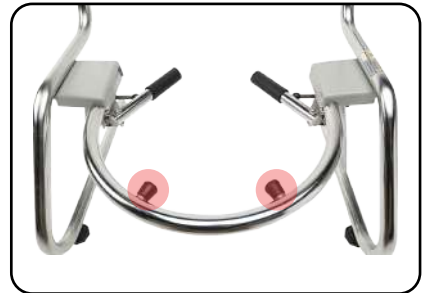

- ③ 고정바(bar)가 변기에 밀착, 고정 되도록 양쪽 노브를 돌려 조절합니다.

※과도한 고정으로 변기 파손이 되지 않도록 유의합니다.

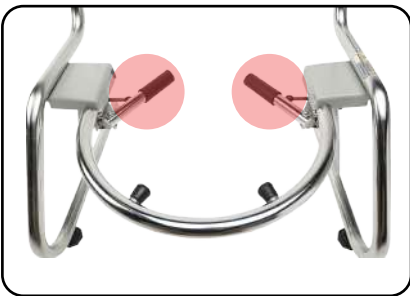

7. 선택적인 고정구조 변경방법



① 4mm 렌치를 이용하여 고정바를 떼어냅니다.



② 6mm 렌치를 이용하여 브라켓을 분리시킵니다.



③ 고정용 확장캡을 장착합니다.



④ 고정용 확장캡이 밀착, 고정 되도록 양쪽 노브를 돌려 조절합니다.

※과도한 고정으로 변기 파손이 되지않도록 유의합니다.

8. 단체표준인증

	<p>단체표준명(품명) : 안전손잡이 단체표준번호 : KSPA5001 인증번호 : 제620호 (20190715-1) 모델명 및 모델 고유번호 : MSH-103S 제조년월 : 제조자명 : (주)엠씨텍 A/S 전화번호 : 1577-5195 제조국명 : 한국</p>
<p>품 질 보 증 본 제품은 단체표준인증단체인 당 협회에서 단체표준제품임을 보증함 한국고령친화용품산업협회</p>	

9. 연장볼트 사용 사례



① 고정노브에 설치하여 길이 연장



② 받침대 노브에 설치하여 높이 조절



③ U-프레임 범퍼 노브에 설치하여 길이 연장



연장볼트 상세(30mm)

※기본 2개 동봉
추가 구매를 원하시면 1577-5195번으로 연락주세요.

품질보증서

품 목 명	안전손잡이	보증기간
제 품 명	MSH-103S	구입일로부터 1년
구 입 일	년 월 일	

고 객	주소	성 명	
		연락처	
판매점	주소(상호)	담당자	
		연락처	

1. 제품 구입시 공란의 내용을 필히 기입하여 주십시오.
2. 본 제품은 출고시 엄밀한 품질관리를 거쳐 생산된 제품입니다.
3. 운송 도중 발생한 파손이나 도금형태가 변질되어 사용불능일 경우, 보증서에 기재된 내용에 따라 보증하여 드립니다.
4. 본 보증서는 재발행되지 않으며, 국내에서만 유효합니다.
5. A/S 및 문의처 : 1577-5195 / 055-323-5195

보증 규정

고객께서 구입하신 본 제품에 대하여 아래와 같은 조건으로 보증하여 드립니다.

1. 보증기간
제품의 정상적인 상태에서 발생한 고장에 대하여 1년간 보증하여 드립니다.
2. 보증수리 제외사항
 - 1) 사용자의 취급부주의 및 조작의 잘못으로 인한 고장이나 파손
 - 2) 당사 지정 수리요원 외 제3자가 수리하였거나 부당한 수리개조에 의한 고장이나 파손
 - 3) 보증서를 분실 또는 수탁 판매점의 직인이 없을 때
 - 4) 천재지변에 의한 고장 및 파손
3. 보증기간 외의 수시
보증기간 경과 후의 수리 요청 시에는 소정의 기술료를 징수합니다.
4. 기타

본 보증규정 이외의 사항에 대하여는 “소비자 기본법”에 의거한 “소비자 분쟁해결기준”에 의해 처리됩니다.

MCTec

(주)엠씨텍
경남 김해시 주촌면 골든루트로66번길 48-1
TEL 1577-5195 | FAX 055-323-5171